

MEDIAID SC背部拉伸带

【产品名称】

SC背部拉伸带

男女通用 保持优美的体态

感谢您购买本产品。

为保证使用安全，使用前请务必阅读本使用说明书。

阅读后请妥善保管，方便需要时阅读。

【注意事项】


- 本产品非治疗型产品。受具体使用情况的影响，某些情况下可能不能起到支撑作用。
- 过敏体质者或皮肤过敏者，穿戴部位出现骨折、疤痕、麻木、肿胀、湿疹等异常情况时请勿使用。
- 使用不当可能导致血液循环障碍和受伤事故，使用本产品时，请务必遵循以下说明。
- 请勿将本产品用于除肩部、背部以外的其他部位。
- 请使用尺寸合适的产品。
- 睡觉时请勿使用本产品。
- 如果您已怀孕或认为自己可能怀孕，使用前请咨询医生。
- 请勿将护具主体和拉伸带收得过紧。
- 如果在使用过程中本产品松动或错位，请按正确步骤重新穿戴。如需长时间使用本产品，请注意不要过度压迫，酌情重新穿戴。
- 如果本产品磨损或损坏，或者粘扣带无法正常粘合，请勿继续使用。
- 使用本产品时，如果出现受伤、骨折、疼痛、麻木、肿胀、湿疹等异常情况，请立即停止使用并咨询医生。继续使用本产品可能会导致症状恶化。
- 粘扣带所使用的材质较硬。在极少数情况下可能会导致手指或皮肤受伤，使用时请注意。
- 应将本产品穿戴在内衣或衣服以外，不要直接接触皮肤。
- 汗水或摩擦等可能会导致本产品褪色或者染色。
- 穿戴本产品时请勿将粘扣带粘到衣物上。否则可能会导致衣物绞线或跑线。

【洗涤方法】

- 本产品可能会褪色或者将其他面料染色。请勿将本产品与浅色物品一起洗涤。
- 将本产品与其他衣服等一起洗涤时，请使用洗涤网，以免绞线或跑线。
- 洗涤时，请将粘扣带固定在本主体上。
- 请勿使用滚筒烘干机。

【如何选择合适的尺寸】

- 请根据腰围尺寸进行选择。测量腰围时以肚脐的位置进行测量。
- 如果测量值在本产品的两个尺寸规格之间，请选择较大的尺寸规格。

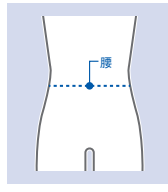

尺寸	适用范围（腰围）
S・M	60～80cm
L・LL	80～100cm

【各部位名称】 主体内侧（皮肤侧）



【穿戴方法】

穿戴前请仔细阅读反面的【注意事项】，然后按照步骤正确穿。

- ①请解开护具主体的所有粘扣带，并确认产品的方向。请按按照标签所示箭头方向确认上下方向。



- ②请背起主体，标签朝内，将双肩穿过带子并固定，使锚点的下端位于肚脐位置。



- ③在保持背部挺直的状态下拉伸带子，一边调节支撑力一边固定后，从上方压实以防止脱落。穿戴后，确认穿戴位置，确保锚点的位置水平。

- ④请确认护具是否松动或错位。如果感觉不协调，请从第一步开始重新穿戴。

※丢弃本产品时，请遵循各地方政府的废弃分类要求。

※产品规格和外观等如有更改，恕不另行通知。

※我们力求产品万无一失，如有质量上的问题发生，请与本公司联系。

日本希格玛株式会社

邮编：160-0023 地址：东京都新宿区西新宿1-24-1