

【产品名称】

SC护颈带

男女通用 高度可调

感谢您购买本产品。

为保证使用安全，使用前请务必阅读本使用说明书。

阅读后请妥善保管，方便需要时阅读。

【注意事项】


- 本产品非治疗型产品。受具体使用情况的影响，某些情况下可能不能起到支撑作用。
- 过敏体质者或皮肤过敏者，穿戴部位出现骨折、疤痕、麻木、肿胀、湿疹等异常情况时请勿使用。
- 使用不当可能导致血液循环障碍和受伤事故，使用本产品时，请务必遵循以下说明。
- 请勿将本产品用于除颈部以外的其他部位。
- 请使用尺寸合适的产品。
- 睡觉时请勿使用本产品。
- 请勿将护具主体收得过紧。
- 如果在使用过程中本产品松动或错位，请按正确步骤重新穿戴。如需长时间使用本产品，请注意不要过度压迫，酌情重新穿戴。
- 如果本产品磨损或损坏，或者粘扣带无法正常粘合，请勿继续使用。
- 使用本产品时，如果出现受伤、骨折、疼痛、麻木、肿胀、湿疹等异常情况，请立即停止使用并咨询医生。继续使用本产品可能会导致症状恶化。
- 粘扣带所使用的材质较硬。在极少数情况下可能会导致手指或皮肤受伤，使用时请注意。
- 汗水或摩擦等可能会导致本产品褪色或者染色。
- 穿戴本产品时将粘扣带粘接到衣物上。否则可能会导致衣物绞线或跑线。

【洗涤方法】

- 本产品可能会褪色或者将其他面料染色。请勿将本产品与浅色物品一起洗涤。
- 本产品可手洗。请以按压方式洗涤，不要扭转拧干，在平铺的状态下，用毛中等擦干，然后在阴凉处悬挂晾干。
- 请勿以折叠存放本产品，否则可能会造成折痕。

【如何选择合适的尺寸】


- 如果颈部超出适用范围，则不建议使用本产品。
- 请测量您的颈部。
- 如果颈部高度小于或等于8cm，颈部可能会感受到较大的压迫力。

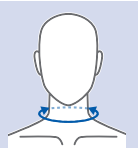

尺寸	适用范围（颈围）
均码	27~40cm

【各部位名称】

主体外侧（表面）

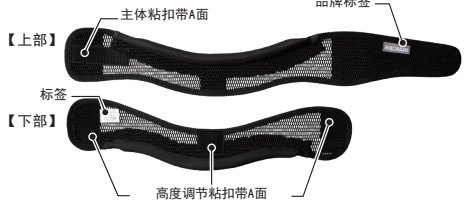

主体内侧（皮肤侧）



【穿戴方法】

穿戴前请仔细阅读反面的【注意事项】，然后按照步骤正确穿。

①请确认产品的方向。

请按照标签所示箭头方向确认上下方向。



②将主体上部、下部的高度调节粘扣带A面/B面相互连接，如左图所示。



③将下巴与主体中心的凹陷部分对齐，使得从外侧可以看到品牌名称标签。此时，请确认高度是否匹配。如果高度不匹配，请再次解开高度调节粘扣带并进行调节。



④将其缠绕在脖子上，使下巴牢固地靠在主体上，然后在后面固定主体粘扣带A面。

⑤请确认护具是否松动或错位。

如感觉不协调，请从第一步开始重新穿戴。

※根据使用情况调节高度，如感觉不适，请停止使用。

※丢弃本产品时，请遵循各地方政府的废弃分类要求。

※产品规格和外观等如有更改，恕不另行通知。

※我们力求产品万无一失，如有质量上的问题发生，请与本公司联系。

日本希格玛株式会社

邮编：160-0023 地址：东京都新宿区西新宿1-24-1