

【产品名称】

标准护腕
坚固保护

感谢您购买本产品。

为保证使用安全，使用前请务必阅读本使用说明书。

阅读后请妥善保管，方便需要时阅读。

【注意事项】

- 本产品非治疗型产品。受具体使用情况的影响，某些情况下可能不能起到支撑作用。
- 过敏体质者或皮肤过敏者，穿戴部位出现骨折、疤痕、麻木、肿胀、湿疹等异常情况时请勿使用。
- 使用不当可能导致血液循环障碍和受伤事故，使用本产品时，请务必遵循以下说明。
- 请勿将本产品用于除手腕以外的其他部位。
- 请使用尺寸合适的产品。
- 睡觉时请勿使用本产品。
- 请勿将护具主体收得过紧。
- 如果在使用过程中本产品松动或错位，请按正确步骤重新穿戴。如需长时间使用本产品，请注意不要过度压迫，酌情重新穿戴。
- 如果本产品磨损或损坏，或者粘扣带无法正常粘合，请勿继续使用。
- 使用本产品时，如果出现受伤、骨折、疼痛、麻木、肿胀、湿疹等异常情况，请立即停止使用并咨询医生。继续使用本产品可能会导致症状恶化。
- 粘扣带所使用的材质较硬。在极少数情况下可能会导致手指或皮肤受伤，使用时请注意。
- 汗水或摩擦等可能会导致本产品褪色或者染色。
- 穿戴本产品时请勿将粘扣带粘到衣物上。否则可能会导致衣物绽线或跑线。


【洗涤方法】

- 本产品可能会褪色或者将其他面料染色。请勿将本产品与浅色物品一起洗涤。
- 将本产品与其他衣服等一起洗涤时，请使用洗涤网，以免绽线或跑线。
- 洗涤时，请将粘扣带固定在本体上。
- 请勿使用滚筒烘干机。

※请参阅包装盒底面或产品标签上的洗涤说明。

【如何选择合适的尺寸】

- 请测量手腕最细部位进行尺码选择。

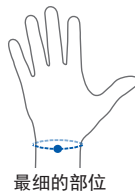

尺寸	适用范围 (手腕围)
M	13~17cm
L	15~21cm

【穿戴方法】



- ①从手背侧缠绕时，
请务必保持握拳状态下进行穿戴。



- ②从手心侧缠绕时，
请务必在掌心摊开的状态下进行穿戴。

※连续缠绕护具时如果对拇指施压过大，可能会导致血液循环障碍或神经损伤。

※丢弃本产品时，请遵循各地方政府的废弃分类要求。

※产品规格和外观等如有更改，恕不另行通知。

※我们力求产品万无一失，如有质量上的问题发生，请与本公司联系。

日本希格玛株式会社

邮编：160-0023 地址：东京都新宿区西新宿1-24-1