

【材质】


材质
锦纶, 氨纶

※お願い:本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

【尺码表】

尺码	适用范围	每盒个数
S	34cm~40cm	1个
M	40cm~46cm	
L	46cm~52cm	
LL	52cm~58cm	

●尺码的选择方法

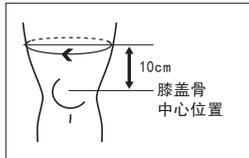

请根据大腿的腿围选择合适的尺码。测量大腿腿围时,请以膝盖骨中心位置向上10cm处为测量点进行测量。

当实测尺寸在两个尺码之间时,请选择较大的尺码。

●尺码标记线

可根据产品上方内侧处尺码标记线的颜色来确认尺码

尺码	尺码标记线
S	绿
M	红
L	黄
LL	紫

※由于产品改良而产生的产品规格、外观上的变更恕不预先通告。
 ※我们在产品品质上力保万全,如您发现品质上的瑕疵,请随时联系本司。

 **SIGMAX** 日本シグマックス株式会社

邮编 160-0023 日本东京都新宿区西新宿1-24-1 7层

MEDIAID

轻薄贴合 护膝

—— 使用说明书 ——

感谢您购买本产品。

为了保证使用安全,使用前请务必阅读本说明书。

阅读后请妥善保管,方便需要时随时查阅。

【用途】

- 保护膝关节

【使用前】

- 本说明书是MEDIAID SF护膝专用说明书。
- 本产品为左右脚兼用。
- 根据使用情况,某些情况下本产品可能无法起到完全保护的作用。
- 本产品无法用于治疗膝关节疾病。
- 使用前请重复确认合适的尺码。尺码表在本说明书P4。

【使用时】

- 由于材质上的特性,产品可能因为存放不当而产生变色。
- 请不要用粗糙情况下的手或指甲等尖锐部位拉扯产品。这会造成产品的磨损或绽线。
- 穿戴时请不要过度拉扯。这会造成产品的磨损、绽线或破损。

【使用注意事项-请务必仔细阅读一】

本使用说明根据危险程度的不同将安全相关注意事项进行如下分类。

- ⚠ 警告…使用方法错误,可能会对人体造成严重伤害。
- ⚠ 注意…使用方法错误,可能会对人体造成轻微伤害或对本产品以外的其他财物造成损失。

⚠警告

- 为防止异常情况的发生或症状的恶化,请勿在以下情况下使用本品。
 - 过敏体质或皮肤敏感人群。【有可能会引起接触性皮炎】
 - 穿戴部位出现骨折、创伤、发麻、肿胀、湿疹、炎症等异常情况时。
- 【压迫会提高症状恶化的危险性】
- 使用本产品时请务必遵守以下事项。若使用不当,可能会造成血液循环障碍或受伤。
 - 请勿使用在膝盖以外的部位。
 - 请使用尺码合适的产品(尺码表在本说明书的P4)。
 - 请勿在睡觉时使用本产品。
- 【入睡时如发生血流障碍,可能无法察觉】
- 如长时间穿戴护具,可在期间适当重新穿戴。长时间的压迫可能会引起皮肤伤害或血流障碍。
- 请正确确认产品的上下、内外、前后,再进行穿戴使用。
- 请根据穿戴步骤正确穿戴使用。
- 使用中如发生松脱或移位,请务必按照穿戴步骤重新穿戴。
- 【有可能会引起血流障碍】
- 当本产品有磨损、损坏时,请勿使用。
- 请勿擅自对本产品进行加工、改造、修理。
- 请勿折叠本产品后使用。【有可能会引起血流障碍】
- 在使用过程中如发生以下异常情况,请立即停止使用,并咨询医生。如继续使用会导致症状恶化。
 - 穿戴感不好等感觉不舒适时。
 - 穿戴部位出现损伤、骨折、伤口、疼痛、发麻、肿胀、湿疹、炎症等异常症状时。

⚠注意


- 本产品可能由于出汗或摩擦的原因造成掉色或染色。

【保养方法】

⚠注意

- 请勿将本产品于浅色衣物一起洗涤。有可能造成掉色或染色。


- 本产品可机洗。洗涤时请使用洗涤袋,洗后请阴干。
- 请勿熨烫,勿使用含氯漂白剂。可使用含氧漂白剂。
- 请勿使用烘干机烘干。这会造成产品损坏。
- 本产品不可干洗。产品可机洗,但请勿使用滚筒甩干。

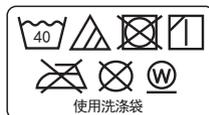

【穿戴步骤】

- 穿戴前请仔细阅读本使用说明P2的【使用注意事项-请务必仔细阅读-】,后按步骤正确穿戴。
- 以下为右脚的穿戴步骤。左脚穿戴时步骤相同。

- 1 将本产品由下向上拉起,如图穿戴。

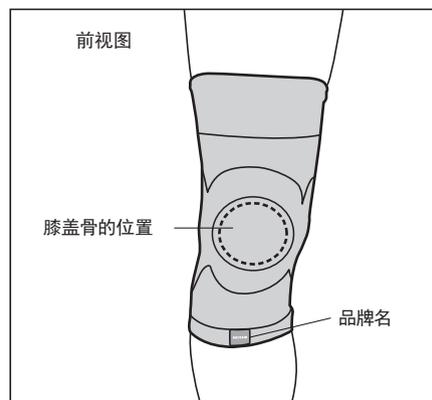

- 2 穿戴后请确认没有褶皱或歪斜。如有不适感,请按步骤重新穿戴。

※如强力向上拉扯本产品,可能会造成产品移位或松弛。
 ※拉伸本产品时,请慢慢向上拉伸。瞬间的强力拉伸可能会造成本产品破损,并且突然受力可能会对皮肤造成负担。