

## 【产品名称】

小腿袜

坚固防护系列

感谢您购买本产品。

为保证使用安全，使用前请务必阅读本使用说明书。

阅读后请妥善保管，方便需要时阅读。

## 【注意事项】

- 本产品非治疗型产品。受具体使用情况的影响，某些情况下可能不能起到支撑作用。
- 所示压力值为设计时数值。根据穿戴方式及穿戴情况会产生压力变化。
- 在使用本产品时，请注意磨损或跑丝。
- 过敏体质者或皮肤过敏者，穿戴部位出现骨折、疤痕、麻木、肿胀、湿疹等异常情况时请勿使用。
- 使用不当可能导致血液循环障碍和受伤事故，使用本产品时，请务必遵循以下说明。
  - 请勿将本产品用于除脚踝以外的其他部位。
  - 请使用尺寸合适的产品。
  - 孕妇或已怀孕者，请遵医嘱。
  - 睡觉时请勿使用本产品。
  - 使用过程中如果出现松动或错位，请务必从第一步按步骤重新正确穿戴。长时间穿戴时，请注意有无过度压迫的情况产生并适时重新穿戴。
  - 请不要重叠穿戴或反穿本产品。
- 使用本产品时，如果出现受伤、骨折、疼痛、麻木、肿胀、湿疹等异常情况，请立即停止使用并咨询医生。继续使用本产品可能会导致症状恶化。
- 汗水或摩擦等可能会导致本产品褪色或者染色。

## 【如何选择合适的尺寸】

- 请测量脚踝最细部分周长来选择合适尺码（测量值在两个尺码之间时，请选择接近尺码中间值的一方）。小腿围数值仅作参考。当小腿围对应尺码与脚踝对应尺码之差在2个尺码以上时，不适用本产品。请根据产品内侧上方的尺码标注线的颜色来确认尺码。



脚踝最细处

尺码	脚踝围（中间值）	小腿围	尺码标注线
S	17~20 (18.5) cm	28~34 cm	绿
M	19~22 (21.0) cm	32~38 cm	红
L	22~25 (23.5) cm	36~42 cm	黄

## 【穿戴方法】



①拉住小腿袜，从脚尖穿入。



②确保没有褶皱及扭曲，一点点向上提拉。

## 【洗涤方法】

- 本产品可能会褪色或者将其他面料染色。请勿将本产品与浅色物品一起洗涤。
  - 请勿使用滚筒烘干机。
- ※请遵照包装盒上的洗涤标进行洗涤。
- ※由于改款等原因本产品的规格、外观等会在无预告的情况下变更。
- ※我们将始终全力保证产品质量，若您发现不良产品，请随时联系我们。

※请注意拉伸时不要一次性强力拉伸或在某一处强力拉伸。有可能会造成产品的破损或对皮肤造成过度负担。且会造成产品移位或松垮。

※丢弃本产品时，请遵循各地方政府的废弃分类要求。

※产品规格和外观等如有更改，恕不另行通知。

※我们力求产品万无一失，如有质量上的问题发生，请与本公司联系。

## 日本希格玛株式会社

邮编：160-0023 地址：东京都新宿区西新宿1-24-1